


روش انجام آزمایش:

روش اول:


مقدار مناسبی ادرار (۲۰ سی سی) را در یک ظرف تمیز جمع آوری نمایید. (برای مثال لیوان یکبار مصرف)
سپس کاست تست بارداری را از داخل جعبه خارج نمایید.
کاست را به صورت عمودی تا قسمت مدرج، داخل نمونه ادرار قرار داده و به مدت (۳ الی ۵ ثانیه) صبر کنید. سپس کاست را از داخل نمونه ادرار خارج کرده و نتیجه را بعد از ۲ دقیقه ملاحظه فرمایید. (شکل ۱)

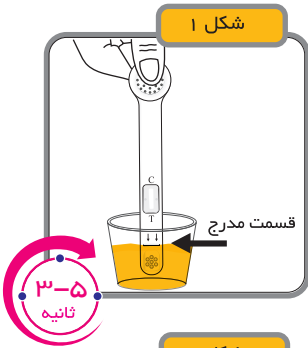

شکل ۲


روش دوم:

ابتدا کاست تست بارداری را از جعبه خارج نمایید و قسمت انتهایی کاست تست بارداری را از قسمت مدرج (با زاویه ۴۵ درجه) در مقابل ادرار روان قرار دهید. به مقدار ناچیزی ادرار روی قسمت مدرج ریخته شود (۳ الی ۵ ثانیه) سپس کاست را از جلوی ادرار خارج کرده و نتیجه را بعد از ۲ دقیقه ملاحظه فرمایید. (شکل ۲)

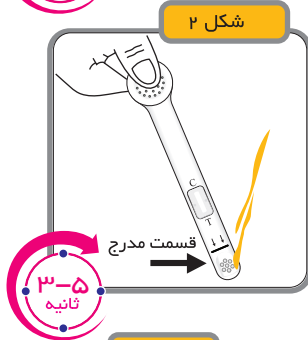

شکل ۳

شکل ۴

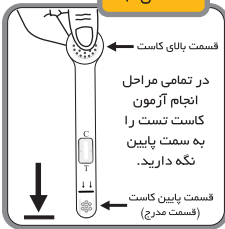




نکته بسیار مهم:

کاست تست را در تمام مراحل انجام آزمون به صورت عمودی (طبق شکل ۳) و یا در سطح صاف قرار دهید. **به هیچ عنوان قسمت پایین کاست (قسمت مدرج) را به سمت بالا برنگردانده و نگه ندارید.** (طبق شکل ۴) زیرا سبب عدم تشکیل هر دو خط (C) و (T) می گردد.

بررسی نتایج:

– ظهور دو خط رنگی در ناحیه (T) و (C) (حتی ممکن است یک خط روشنتر از دیگری باشد) نشان دهنده مثبت بودن آزمایش است در این حالت احتمال بارداری وجود دارد.

– ایجاد یک خط رنگی در قسمت کنترل (C) نشان دهنده نتیجه منفی میباشد. در این حالت احتمالاً باردار نیستید.

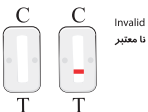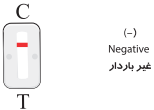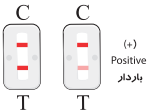

برای مشاهده فیلم انجام آزمایش بارکد روی جعبه را اسکن کنید

– در صورتیکه هیچ خط رنگی ایجاد نشود و یا عدم ظهور خط رنگی در ناحیه (C)، نتیجه فاقد اعتبار است و در این حالت برنگه راهنما را یک بار دیگر به دقت بخوانید و با یک نمونه جدید تست را تکرار نمایید. توجه: غلظت خیلی پایین HCG ممکن است بعد از گذشت زمان طولانی، یک خط کم رنگ در ناحیه خط تست (T) ایجاد کند بنابراین این نتایج بدست آمده **بعد از ۵ دقیقه قابل استناد نمی باشد.**